

Kamizelka (siedzisko) LeviKam

instrukcja obsługi



LeviCare

www.levicare.pl




796-970-503



info@levicare.pl



ul. Mieszka I 6, 77-100 Rzepnica

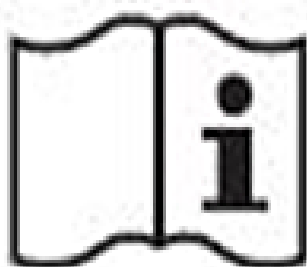

Uwaga! Przed użyciem kamizelki należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją

Zawartość opakowania:

- kamizelka LeviKam
- instrukcja obsługi

 **LeviCare**



Siedzisko Levikam

Levikam sling

Udźwig/Max. load 140 kg

Rok produkcji/ Manufacture date

2015 2016 2017

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Rozmiar / Size

S
 M
 L
 XL

Typ / Type

Integral
 Levikam +
 Standard

Gwarancja

Gwarantujemy niezawodność działania naszej kamizelki. Na defekty materiałowe udzielamy 24-miesięcznej gwarancji

Zużycie, uszkodzenie, przeciążenie i nieprawidłowe użycie powodują wygaśnięcie gwarancji.

Uwaga! Nie przestrzeganie instrukcji obsługi, nieprawidłowo wykonane przeglądy urządzenia, zaniechanie przeglądów, używanie kamizelki niezgodnie z zaleceniami, prowadzi do wygaśnięcia gwarancji i przejęcie wszelkiej odpowiedzialności mprzez osobę, do której należy kamizelka.

Wszystkie kamizelki Levikam zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych.

Kamizelki LeviKam

LeviKam to kamizelki do podnośników dla osób niepełnosprawnych, które charakteryzują się wysoką jakością wykonania i przemyślanym kształtem. Wykonane z odpowiednio dobranych, wytrzymałych i bezpiecznych materiałów. Różne możliwości zamocowania sprawiają, że kamizelki współdziałają z podnośnikiem LeviCare Q140 oraz podobnymi urządzeniami innych producentów (np. podnośniki jezdne). Kamizelka przeznaczona jest zarówno do transportu jak czynności sanitarnych i higienicznych. Szybkoschnący, perforowany materiał zapewni komfort przy użytkowaniu w łazience lub basenie.


W ofercie dostępne są 3 rozmiary kamizelek S,M,L. W trosce o komfort i bezpieczeństwo klientów, dostępne są również kamizelki LeviKam na zamówienie.

Uwagi ogólne




Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić kamizelkę, czy nie jest uszkodzona - w momencie zauważenia uszkodzenia nie wolno jej używać ani samodzielnie naprawiać.

- Nie należy stosować kamizelek podnoszących LeviCare w przypadku, gdy podnoszenie osoby nie jest wskazane ze względu na jej stan zdrowia i inne przeciwwskazania.
- Maksymalna waga użytkownika wynosi 140kg.
- Rozmiar kamizelki powinien być odpowiednio dobrany do potrzeb użytkownika
- Kamizelka powinna być używana zgodnie z przeznaczeniem
- Należy podnosić pacjenta najkrócej jak to jest możliwe i nie należy zostawić pacjenta wiszącego bez opieki
- Trzymać kamizelki transportowe z dala od wysokiej temperatury i źródeł ognia

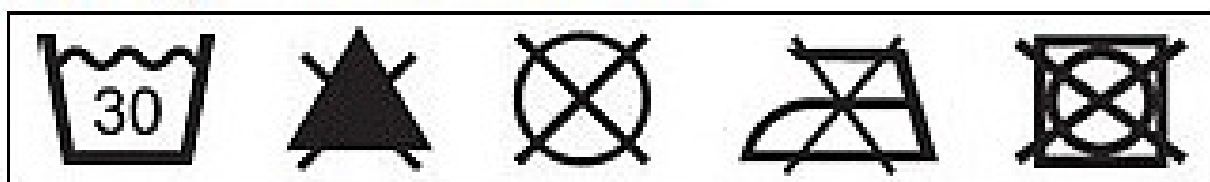


Budowa kamizelki

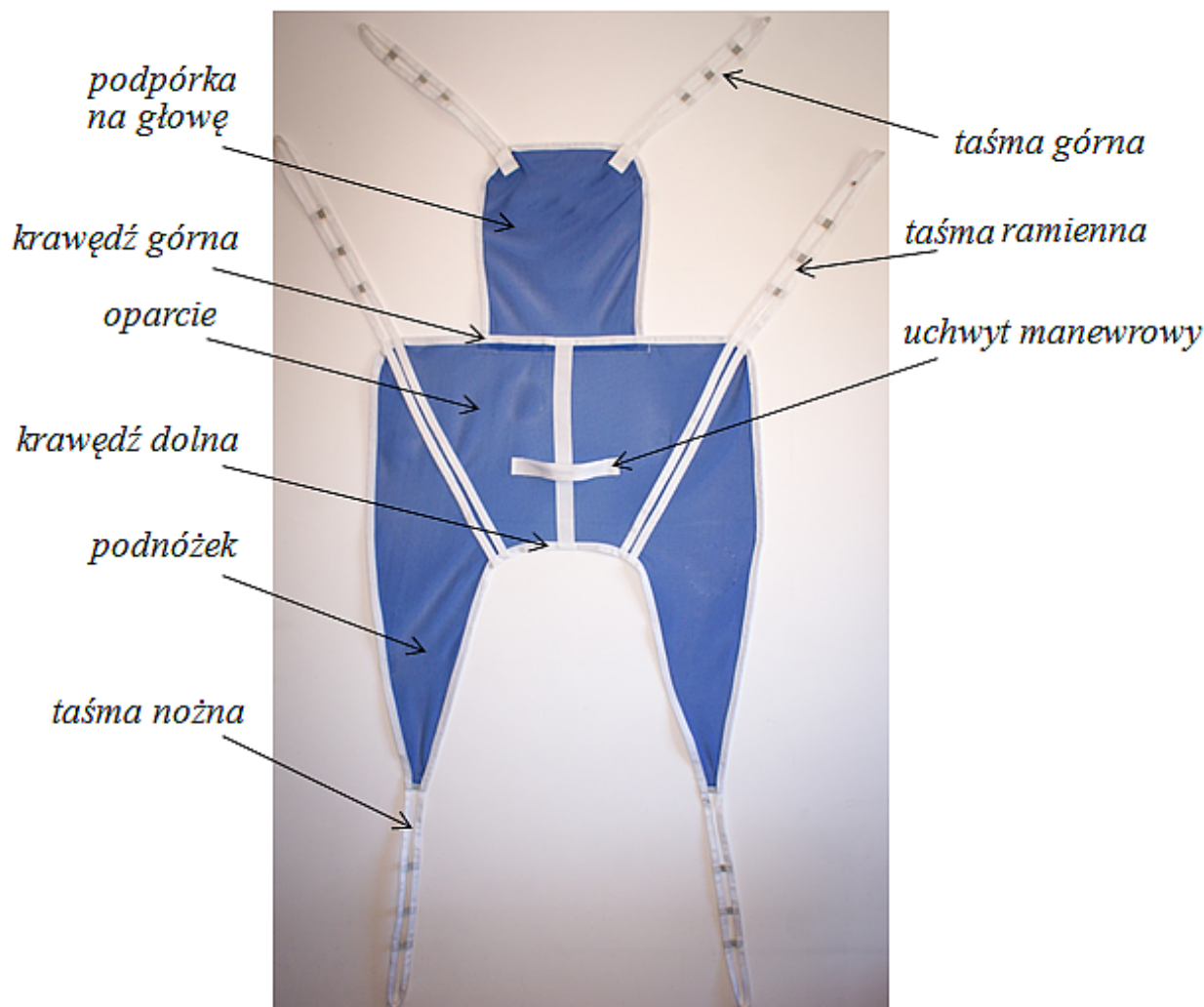

Taśmy nożne, ramienne i podpórki na głowę składają się z odpornych na zrywanie materiałów i podczepiane powinny być do orczyka. Możliwe jest zamontowanie kamizelek do 2,4 lub 6 punktowych orczyków. Taśmy ramienne i nożne mają możliwość regulacji ich długości w celu uzyskania właściwej pozycji siedzenia. Na zewnętrznej stronie kamizelki do siatki doszyte są odpowiednie uchwyty manewrowe.



Rodzaj i rozmiar kamizelki transportowej uwarunkowany jest zawsze wymiarami i sylwetką osoby podnoszonej. Firma Levicare posiada w swojej ofercie kamizelki o uniwersalnych rozmiarach , może również uszyć kamizelkę na specjalne zamówienie.

Zakładanie kamizelki z pozycji leżącej

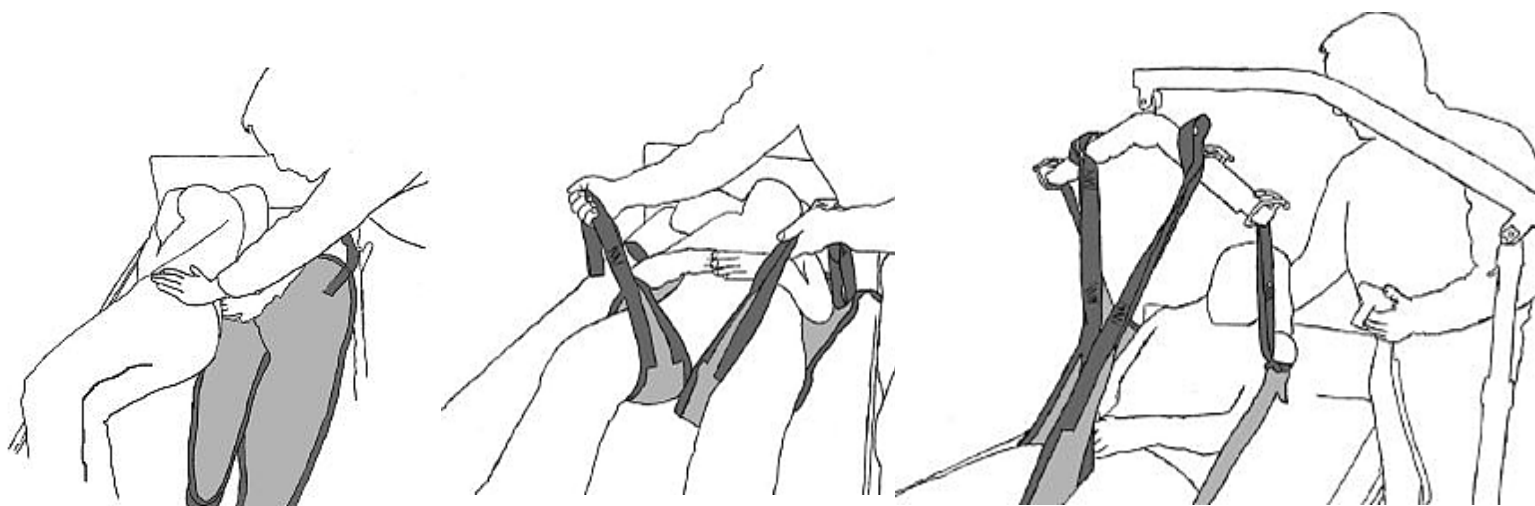

1. Należy ustawić łóżko tak aby materac był w pozycji poziomej.
2. Osobę podnoszoną, która leży na plecach należy przekręcić na bok.
3. Złożyć kamizelkę podnoszącą na pół wzdłuż jej osi symetrii i położyć za plecami pacjenta. Dolna krawędź kamizelki powinna leżeć na wysokości kości ogonowej.
4. Przekręcić osobę podnoszoną na drugi bok i rozłożyć kamizelkę płasko na łóżku.
5. Położyć osobę podnoszoną płasko na plecach i wyciągnąć taśmy nożne pomiędzy nogami, a taśmy ramienne odpowiednio przy ramionach.
6. Należy przyciągnąć ramię podnośnika wraz z orczykiem transportowym w okolice osoby podnoszonej.
7. Założyć taśmy nożne na haki orczyka tak aby były ustawione w stosunku do siebie równolegle. Należy zwrócić uwagę aby taśmy nożne były założone na orczyki w tych samych kombinacjach: długie – długie, średnie – średnie lub krótkie – krótkie.
8. Założyć taśmy ramienne na haki orczyka, odpowiednio: taśma z prawego ramienia do prawej taśmy nożnej, a taśma z lewego ramienia do lewej taśmy nożnej. Należy zwrócić uwagę aby taśmy ramienne były założone na orczyki w tych samych kombinacjach: długie – długie, średnie – średnie lub krótkie – krótkie.

Zakładanie kamizelki w pozycji siedzącej

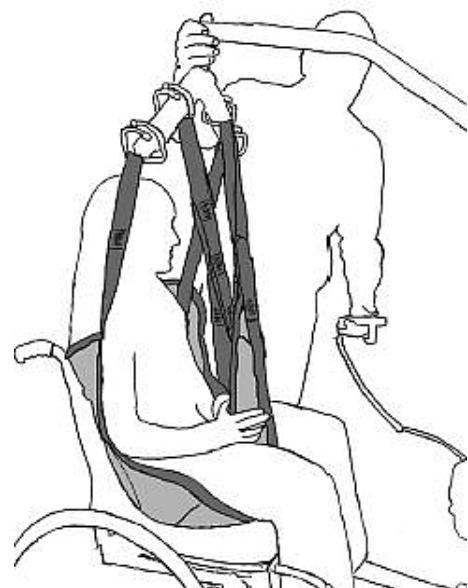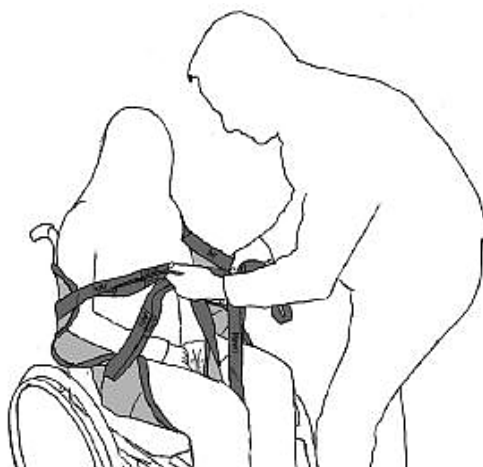

1. Należy ustawić wózek inwalidzki z pacjentem bezpośrednio pod orczykiem transportowym podnośnika, tak aby znajdował się on nad głową pacjenta.
2. Odchylić pacjenta od oparcia wózka w przód i wsunąć kamizelkę transportową za plecy osoby w kierunku siedziska, najgłębiej jak to możliwe. Należy zwrócić uwagę aby taśmy nożne leżały we właściwy sposób (niezagięte), odpowiednio z prawej i lewej strony nóg pacjenta.
3. Wyciągnąć taśmy nożne pod udami, pomiędzy nogi pacjenta. Naciągnąć obustronnie taśmy nożne tak aby materiał nie zaginał się i równomiernie opasał nogi. Ułożyć taśmy ramienne tak aby znajdowały się odpowiednio: prawa taśma ramienna przy prawym ramieniu, a lewa taśma ramienna przy lewym ramieniu.
4. Założyć taśmy nożne na haki orczyka tak, aby były ustawione w stosunku do siebie równoległe. Należy zwrócić uwagę aby taśmy nożne były założone na orczyki w tych samych kombinacjach: długie – długie, średnie – średnie lub krótkie – krótkie.
5. Założyć taśmy ramienne na haki orczyka, odpowiednio: taśma z prawego ramienia do prawej taśmy nożnej, a taśma z lewego ramienia do lewej taśmy nożnej. Należy zwrócić uwagę aby taśmy ramienne były założone na orczyki w tych samych kombinacjach: długie – długie, średnie – średnie lub krótkie – krótkie.